



CATALOGUE CONTAINERS DE STÉRILISATION 2026

Nous Contacter : www.ibmhconseils.com
contact@ibmhconseils.com

INFOS CONTAINERS - CONTAINERS INFORMATION

- 04 Caractéristiques générales - *Main features*
- 06 Composants et accessoires de container - *Sterilization Container Components*

CONTAINERS DE STÉRILISATION - STERILIZATION CONTAINER SYSTEM

- 14 Containers Standards DIN 1/1 - *1/1 Standards Size Containers*
- 16 Containers Taille DIN 3/4 - *3/4 Size Containers*
- 18 Containers Taille DIN 1/2 - *1/2 Size Containers*
- 22 Containers Extra-longs - *Long Body Containers*
- 22 Containers Extra-larges - *Wide body Containers*
- 23 Containers Taille Spéciale - *Special Size Containers*
- 24 Containers de Réacheminement - *Transport Containers*
- 25 Boîtes d'implants et endoscopie - *Implant and Endoscopy Boxes*
- 28 Containers DIN 1/2 Plats - *1/2 Size Flat Containers*
- 29 Containers Mini DIN 1/4 - *1/4 Mini Containers*
- 30 Containers Dentaires - *Dental Containers*
- 31 Containers DIN 1/2 Dentaires - *1/2 Dental Size Containers*

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES - DISPOSABLE AND ACCESSORIES

- 33 Filtres - *Filters*
- 34 Plombs de verrouillage - *Security Seals*
- 35 Étiquettes pour containers - *Containers Labels*

MAINTENANCE CONTAINERS - REPAIR SERVICE

- 40 Marquage laser personnalisé des containers - *Custom laser marking*
- 42 Maintenance des containers - *Repair service*
- 44 Notice d'utilisation - *Instructions for use*

INFOS CONTAINERS

CONTAINERS INFORMATION



SAMMEX propose des containers de stérilisation de grande qualité destinés à la stérilisation, le stockage, le transport et la mise à disposition des instruments chirurgicaux.

La large gamme de containers permet de répondre parfaitement aux besoins les plus spécifiques des opérateurs en milieux hospitaliers.

Les containers répondent aux exigences des normes EN868, EN11607 et marquage CE selon RDM.

Les containers sont garantis 1 an.

SAMMEX offers high quality sterilization containers for packaging, sterilization, storage, transport and provision of surgical instruments.

The wide range of containers makes it possible to completely meet the most specific needs of operators in hospitals.

They perfectly meet the requirements of standards EN868 , EN11607 and CE marking according to the MDR.

The containers are guaranteed for 1 year.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET AVANTAGES

- Fabrication en Aluminium à surface anodisée
- Cuves et couvercles emboutis pour une plus grande résistance et rigidité
- Joint en Silicone atoxique garantissant une parfaite étanchéité
- Système de verrouillage compatible avec les plombs de verrouillage usuels
- Système de containers modulaires
- Stockage stérile de longue durée
- Sécurité d'acheminement des instruments stériles
- Plus de sécurité par rapport aux emballages papier
- Nettoyage et manipulation facile
- Conforme à la série des normes EN-868 et EN-11607
- Marquage CE selon RDM

MAIN FEATURES

- *Aluminum manufacturing with anodized surface*
- *Pressed bottom and lid for greater strength and rigidity*
- *Non-toxic silicone gasket guarantees a perfect seal*
- *Locking system compatible with the usual locking seals*
- *Modular container system*
- *Long-lasting sterile storage*
- *Safe transport of sterile instruments*
- *More security compared to paper wrapping*
- *Cleaning and easy handling*
- *Complies with the EN-868 and EN-11607 series of standards*
- *CE marking according to MDR*

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DES CONTAINERS DE STÉRILISATION

STERILIZATION CONTAINERS COMPONENTS AND ACCESSORIES



01 / SUR-COUVERCLE (6 COLORIS DISPONIBLES : ALU, JAUNE, ROUGE, BLEU, VERT ET NOIR)

SAFETY LID (6 COLORS AVAILABLE: ALU, YELLOW, RED, BLUE, GREEN AND BLACK)

02 / BOUTON DÉVERROUILLAGE

LOCK BUTTON

03 / COUVERCLE (6 COLORIS DISPONIBLES : ALU, JAUNE, ROUGE, BLEU, VERT ET NOIR)

LID (6 COLORS: ALU, YELLOW, RED, BLUE, GREEN AND BLACK)

04 / PATTE DE FERMETURE

LOCKING PLATE

05 / FILTRE POUR CONTAINER

CONTAINER FILTER

06 / PORTE-FILTRE INOX

FILTER HOLDER

07 / CUVE DU CONTAINER

CONTAINER BOTTOM

08 / RESSORT

NOTCH LOCKING

09 / PORTE ÉTIQUETTE ET ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION ALUMINIUM (AVEC OPTION GRAVAGE LASER)

ALUMINUM IDENTIFICATION LABEL WITH LASER MARKING

10 / POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

STAINLESS STEEL HANDLE

11 / ÉTIQUETTE PAPIER À USAGE UNIQUE AVEC INDICATEUR VAPEUR

SINGLE-USE PAPER LABEL WITH STEAM INDICATOR

12 / PLOMB DE VERROUILLAGE

LOCKING SEAL

OPTIONS CONTAINERS PERFORÉS OU NON-PERFORÉS

Les utilisateurs peuvent choisir :

- Cuve non perforée pour les cycles de vide fractionné.
- Cuve perforée pour les charges à forte densité ou pour les cycles de gravitation.

PERFORATED OR NON-PERFORATED CONTAINERS OPTIONS

Users can choose :

- Non perforated bottom for vacuum cycles
- Perforated bottom for high density load or gravity cycles.



OPTION SUR-COUCERCLE

Le sur-couvercle offre une protection physique contre les éventuels incidents extérieurs (poussières, projections, chocs...) et assure la protection de la barrière stérile selon EN 11607 durant le transport et le stockage.

Il peut facilement se retirer grâce à son bouton de déverrouillage.

SAFETY-LID OPTION AND SPECIFICATIONS

The safety lid offers a physical protection against eventual exterior incidents (dust, projections, shocks...) and ensures the sterile barrier protection according to EN 11607 standard during both storage and transport.

It can be easily removed thanks to the lock button.



LE COUVERCLE

LID

Le couvercle est composé d'un joint d'étanchéité en silicone assurant la barrière microbienne (physique et mécanique) entre la cuve et le couvercle.

The lid is composed with a silicone gasket which ensures the microbial barrier (physical and mechanical) between the base and the lid.



FILTRE

À usage unique ou permanent (PTFE 1200 cycles), le filtre préserve la barrière microbienne et empêche les micro-organismes de pénétrer dans le container après la stérilisation.

FILTER

Disposable or permanent (PTFE 1200 cycles), the filter preserves the microbial barrier and prevents microorganisms from entering the container after sterilization.

PORTE-FILTRE

Le porte-filtre est un système de verrouillage qui permet de maintenir le filtre. Il est compatible avec tous les containers standards SAMMEX.

FILTER RETAINER

The filter holder is a locking system that holds the filter. It is compatible with all standard SAMMEX containers.

IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

IDENTIFICATION AND TRACEABILITY

Marquage et identification simplifiés, les étiquettes garantissent une traçabilité sûre pour chaque container.

Marking and simplified identification, the labels guarantee a safe traceability for each container.



ÉTIQUETTES PAPIER USAGE UNIQUE

Les étiquettes préremplies permettent de noter toutes les informations nécessaires et disposent ou non d'un indicateur de passage vapeur.

PAPER LABEL

The paper labels guarantee the traceability of each container.

Pre-filled labels provide a record of all relevant information and can have steam indicator.

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ALUMINIUM

Les étiquettes aluminium sont résistantes aux manipulations et chocs fréquents.

Elles sont disponibles en plusieurs couleurs (alu, jaune, rouge, bleu, vert, noir) et peuvent être identifiées grâce à un marquage laser avec un code barre, texte... permettant une identification visuelle rapide

ALUMINIUM IDENTIFICATION LABEL

Aluminum labels are resistant to frequent handling and shock.

They are available in several colors (grey, yellow red, blue, green, black) and can be identified by laser marking with a barcode, text... to insure easy visual identification

STÉRILISATION SÉCURISÉE *SAFE STERILIZATION*

PLOMBS DE VERROUILLAGE

Les plombs de verrouillage sont utilisés pour garantir l'intégrité du container pendant le transport et le stockage après la stérilisation.

SECURITY SEALS

Security seals are used to guarantee the container integrity during transport and storage after sterilization.



CONTAINERS TAILLE DIN

DIN SIZE CONTAINERS





CONTAINERS STANDARDS DIN 1/1

1/1 STANDARDS SIZE CONTAINERS

















Containers Standards DIN 1/1

1/1 Standards Size Containers

Dimensions externes / Outside dimensions

Dimensions internes / Inside dimensions

| Type Type | Couleur Color | 585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 85 mm | 585 x 280 x 135 mm 550 x 260 x 115 mm | 585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 135 mm | 585 x 280 x 205 mm 550 x 260 x 185 mm | 585 x 280 x 265 mm 550 x 260 x 245 mm |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Cuve Non Perforée Non-perforated Bottom  |  | SY110.10 | SY110.13 | SY110.15 | SY110.20 | SY110.26 |
| |  | SY120.10 | SY120.13 | SY120.15 | SY120.20 | SY120.26 |
| |  | SY130.10 | SY130.13 | SY130.15 | SY130.20 | SY130.26 |
| |  | SY140.10 | SY140.13 | SY140.15 | SY140.20 | SY140.26 |
| |  | SY150.10 | SY150.13 | SY150.15 | SY150.20 | SY150.26 |
| |  | SY160.10 | SY160.13 | SY160.15 | SY160.20 | SY160.26 |

| Type Type | Couleur Color | 585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 75 mm | 585 x 280 x 135 mm 550 x 260 x 105 mm | 585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 125 mm | 585 x 280 x 205 mm 550 x 260 x 175 mm | 585 x 280 x 265 mm 550 x 260 x 235 mm |
|--|---|---|--|--|--|--|
| Cuve Perforée Perforated Bottom  |  | SY111.10 | SY111.13 | SY111.15 | SY111.20 | SY111.26 |
| |  | SY121.10 | SY121.13 | SY121.15 | SY121.20 | SY121.26 |
| |  | SY131.10 | SY131.13 | SY131.15 | SY131.20 | SY131.26 |
| |  | SY141.10 | SY141.13 | SY141.15 | SY141.20 | SY141.26 |
| |  | SY151.10 | SY151.13 | SY151.15 | SY151.20 | SY151.26 |
| |  | SY161.10 | SY161.13 | SY161.15 | SY161.20 | SY161.26 |



Sur-couvercles 1/1 (option) Safety Lids 1/1 (optional)

| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| SY103.01 | | 585 x 280 mm |
| SY103.02 | | " |
| SY103.03 | | " |
| SY103.04 | | " |
| SY103.05 | | " |
| SY103.06 | | " |

Couvercles 1/1 Lids 1/1

| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| SY100.01 | | 585 x 280 mm |
| SY100.02 | | " |
| SY100.03 | | " |
| SY100.04 | | " |
| SY100.05 | | " |
| SY100.06 | | " |



Cuves 1/1 Bottom 1/1



Non perforée
Non-perforated



Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

| | |
|----------|---|
| SY105.10 | 585 x 280 x 90 mm 550 x 260 x 85 mm |
| SY105.13 | 585 x 280 x 120 mm 550 x 260 x 115 mm |
| SY105.15 | 585 x 280 x 140 mm 550 x 260 x 135 mm |
| SY105.20 | 585 x 280 x 190 mm 550 x 260 x 185 mm |
| SY105.26 | 585 x 280 x 250 mm 550 x 260 x 245 mm |

Perforée
Perforated



Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

| | |
|----------|---|
| SY106.10 | 585 x 280 x 90 mm 550 x 260 x 75 mm |
| SY106.13 | 585 x 280 x 120 mm 550 x 260 x 105 mm |
| SY106.15 | 585 x 280 x 140 mm 550 x 260 x 125 mm |
| SY106.20 | 585 x 280 x 190 mm 550 x 260 x 175 mm |
| SY106.26 | 585 x 280 x 250 mm 550 x 260 x 235 mm |

CONTAINERS TAILLE DIN 3/4

3/4 SIZE CONTAINERS



Containers Taille DIN 3/4

3/4 Size Containers

Dimensions externes / Outside dimensions
Dimensions internes / Inside dimensions

| Type Type | Couleur Color | 465 x 280 x 105 mm 430 x 260 x 85 mm | 465 x 280 x 135 mm 430 x 260 x 115 mm | 465 x 280 x 155 mm 430 x 260 x 135 mm |
|--|---|---|--|--|
| Cuve Non Perforée Non-perforated Bottom  |  | SY210.10 | SY210.13 | SY210.15 |
| |  | SY220.10 | SY220.13 | SY220.15 |
| |  | SY230.10 | SY230.13 | SY230.15 |
| |  | SY240.10 | SY240.13 | SY240.15 |
| |  | SY250.10 | SY250.13 | SY250.15 |
| |  | SY260.10 | SY260.13 | SY260.15 |
| Type Type | Couleur Color | 465 x 280 x 105 mm 430 x 260 x 75 mm | 465 x 280 x 135 mm 430 x 260 x 105 mm | 465 x 280 x 155 mm 430 x 260 x 125 mm |
| Cuve Perforée Perforated Bottom  |  | SY211.10 | SY211.13 | SY211.15 |
| |  | SY221.10 | SY221.13 | SY221.15 |
| |  | SY231.10 | SY231.13 | SY231.15 |
| |  | SY241.10 | SY241.13 | SY241.15 |
| |  | SY251.10 | SY251.13 | SY251.15 |
| |  | SY261.10 | SY261.13 | SY261.15 |

Sur-couvercles 3/4 (option) Safety Lids 3/4 (optional)



| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| SY203.01 | | 465 x 280 mm |
| SY203.02 | | " |
| SY203.03 | | " |
| SY203.04 | | " |
| SY203.05 | | " |
| SY203.06 | | " |

Couvercles 3/4 Lids 3/4

| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| SY200.01 | | 465 x 280 mm |
| SY200.02 | | " |
| SY200.03 | | " |
| SY200.04 | | " |
| SY200.05 | | " |
| SY200.06 | | " |



Cuves 3/4 Bottom 3/4



Non perforée
Non-perforated



Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

| | |
|----------|---|
| SY205.10 | 465 x 280 x 90 mm 430 x 260 x 85 mm |
| SY205.13 | 465 x 280 x 120 mm 430 x 260 x 115 mm |
| SY205.15 | 465 x 280 x 140 mm 430 x 260 x 135 mm |

Perforée
Perforated



Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

| | |
|----------|---|
| SY206.10 | 465 x 280 x 90 mm 430 x 260 x 75 mm |
| SY206.13 | 465 x 280 x 120 mm 430 x 260 x 105 mm |
| SY206.15 | 465 x 280 x 140 mm 430 x 260 x 125 mm |



CONTAINERS TAILLE DIN 1/2

1/2 SIZE CONTAINERS



Containers Taille DIN 1/2

1/2 Size Containers

Dimensions externes / Outside dimensions

Dimensions internes / Inside dimensions

| Type Type | Couleur Color | 295 x 280 x 105 mm 260 x 260 x 85 mm | 295 x 280 x 135 mm 260 x 260 x 115 mm | 295 x 280 x 155 mm 260 x 260 x 135 mm | 295 x 280 x 205 mm 260 x 260 x 185 mm | 295 x 280 x 265 mm 260 x 260 x 245 mm |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Cuve Non Perforée Non-perforated Bottom  |  | SY310.10 | SY310.13 | SY310.15 | SY310.20 | SY310.26 |
| |  | SY320.10 | SY320.13 | SY320.15 | SY320.20 | SY320.26 |
| |  | SY330.10 | SY330.13 | SY330.15 | SY330.20 | SY330.26 |
| |  | SY340.10 | SY340.13 | SY340.15 | SY340.20 | SY340.26 |
| |  | SY350.10 | SY350.13 | SY350.15 | SY350.20 | SY350.26 |
| |  | SY360.10 | SY360.13 | SY360.15 | SY360.20 | SY360.26 |
| Type Type | Couleur Color | 295 x 280 x 105 mm 260 x 260 x 75 mm | 295 x 280 x 135 mm 260 x 260 x 105 mm | 295 x 280 x 155 mm 260 x 260 x 125 mm | 295 x 280 x 205 mm 260 x 260 x 175 mm | 295 x 280 x 265 mm 260 x 260 x 235 mm |
| Cuve Perforée Perforated Bottom  |  | SY311.10 | SY311.13 | SY311.15 | SY311.20 | SY311.26 |
| |  | SY321.10 | SY321.13 | SY321.15 | SY321.20 | SY321.26 |
| |  | SY331.10 | SY331.13 | SY331.15 | SY331.20 | SY331.26 |
| |  | SY341.10 | SY341.13 | SY341.15 | SY341.20 | SY341.26 |
| |  | SY351.10 | SY351.13 | SY351.15 | SY351.20 | SY351.26 |
| |  | SY361.10 | SY361.13 | SY361.15 | SY361.20 | SY361.26 |

Sur-couvercles 1/2 (option) Safety Lids 1/2 (optional)



| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| SY303.01 | | 295 x 280 mm |
| SY303.02 | | " |
| SY303.03 | | " |
| SY303.04 | | " |
| SY303.05 | | " |
| SY303.06 | | " |

Couvercles 1/2 Lids 1/2

| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| SY300.01 | | 295 x 280 mm |
| SY300.02 | | " |
| SY300.03 | | " |
| SY300.04 | | " |
| SY300.05 | | " |
| SY300.06 | | " |



Cuves 1/2 Bottom 1/2



Non perforée
Non-perforated



Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

| | |
|----------|---|
| SY305.10 | 295 x 280 x 90 mm 260 x 260 x 85 mm |
| SY305.13 | 295 x 280 x 120 mm 260 x 260 x 115 mm |
| SY305.15 | 295 x 280 x 140 mm 260 x 260 x 135 mm |
| SY305.20 | 295 x 280 x 190 mm 260 x 260 x 185 mm |
| SY305.26 | 295 x 280 x 250 mm 260 x 260 x 245 mm |

Perforée
Perforated



Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

| | |
|----------|---|
| SY306.10 | 295 x 280 x 90 mm 260 x 260 x 75 mm |
| SY306.13 | 295 x 280 x 120 mm 260 x 260 x 105 mm |
| SY306.15 | 295 x 280 x 140 mm 260 x 260 x 125 mm |
| SY306.20 | 295 x 280 x 190 mm 260 x 260 x 175 mm |
| SY306.26 | 295 x 280 x 250 mm 260 x 260 x 235 mm |

CONTAINERS DIMENSIONS SPÉCIALES

SPECIAL SIZE CONTAINERS





CONTAINERS EXTRA-LONGS - CONTAINERS EXTRA-LARGES

LONG BODY CONTAINERS - WIDE BODY CONTAINERS



Containers Extra-Longs Long Body Containers

Dimensions externes / Outside dimensions
Dimensions internes / Inside dimensions

| Type Type | Couleur Color | 710 x 280 x 205 mm 685 x 260 x 185 mm |
|--|------------------|--|
| Cuve Non Perforée Non-perforated Bottom | | SY110.70W |
| | | SY120.70W |
| | | SY130.70W |
| | | SY140.70W |
| | | SY150.70W |
| | | SY160.70W |

| Type Type | Couleur Color | 710 x 280 x 205 mm 685 x 260 x 175 mm |
|---------------------------------------|------------------|--|
| Cuve Perforée Perforated Bottom | | SY111.70W |
| | | SY121.70W |
| | | SY131.70W |
| | | SY141.70W |
| | | SY151.70W |
| | | SY161.70W |

Containers Extra-Larges Wide Body Containers

Dimensions externes / Outside dimensions
Dimensions internes / Inside dimensions

| Type Type | Couleur Color | 600 x 400 x 125 mm 565 x 380 x 105 mm | 600 x 400 x 185 mm 565 x 380 x 165 mm |
|--|------------------|--|--|
| Cuve Non Perforée Non-perforated Bottom | | SY110.62 | SY110.68 |
| | | SY120.62 | SY120.68 |
| | | SY130.62 | SY130.68 |
| | | SY140.62 | SY140.68 |
| | | SY150.62 | SY150.68 |
| | | SY160.62 | SY160.68 |

| Type Type | Couleur Color | 600 x 400 x 125 mm 565 x 380 x 95 mm | 600 x 400 x 185 mm 565 x 380 x 155 mm |
|---------------------------------------|------------------|---|--|
| Cuve Perforée Perforated Bottom | | SY111.62 | SY111.68 |
| | | SY121.62 | SY121.68 |
| | | SY131.62 | SY131.68 |
| | | SY141.62 | SY141.68 |
| | | SY151.62 | SY151.68 |
| | | SY161.62 | SY161.68 |





Containers Taille Spéciale

Special Size Containers

Non perforée
Non-perforated

Couleur
Color

Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.



SK055.10



350 x 250 x 105 mm
315 x 230 x 85 mm

SK055.13



350 x 250 x 135 mm
315 x 230 x 115 mm

Accessoires Taille Spéciale

Special Size Accessories

| Référence Reference | Description Description | Dimensions Dimensions |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SK090.05 | Panier grillagé Wire Basket | 300 x 230 x 50 mm |
| SK090.07 | Panier grillagé Wire Basket | 300 x 230 x 70 mm |





Containers de réacheminement 1/1

Transport Containers 1/1

Cuve et couvercle
Non Perforés
Bottom and lid
non-perforated

Couleur
Color

Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

| | | |
|----------|---|---|
| SY115.10 | ● | 585 x 280 x 105 mm 550 x 260 x 85 mm |
| SY115.15 | ● | 585 x 280 x 155 mm 550 x 260 x 135 mm |



Containers de réacheminement 1/2

Transport Containers 1/2

Cuve et couvercle
Non Perforés
Bottom and lid
non-perforated

Couleur
Color

Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.








| | | |
|----------|---|---|
| SY315.10 | ● | 295 x 280 x 105 mm 260 x 260 x 85 mm |
| SY315.15 | ● | 295 x 280 x 155 mm 260 x 260 x 135 mm |



Boîtes d'implants

Implant Box




Dimensions externes / *Outside dimensions*
Dimensions internes / *Inside dimensions*

| Type <i>Type</i> | Couleur <i>Color</i> | 310 x 140 x 65 mm 300 x 115 x 60 mm | 500 x 155 x 75 mm 485 x 135 x 70 mm |
|--|---|--|--|
| Cuve Non Perforée <i>Non-perforated Bottom</i>  |  | SY610.06 | SY612.07 |
| |  | SY620.06 | SY622.07 |
| |  | SY630.06 | SY632.07 |
| |  | SY640.06 | SY642.07 |
| |  | SY650.06 | SY652.07 |
| |  | SY660.06 | SY662.07 |

Boîtes d'endoscopie

Endoscopy Box



| Cuve Perforés <i>Bottom perforated</i> | Couleur <i>Color</i> | Dim. ext. / <i>Outside dim.</i> Dim. int. / <i>Inside dim.</i> |
|---|---|---|
|  | | |
| SY600.01 |  | 255 x 60 x 50 mm 250 x 55 x 45 mm |
| SY600.02 |  | 455 x 70 x 70 mm 450 x 65 x 65 mm |

CONTAINERS PETITE TAILLE

SMALL SIZE CONTAINERS




















Containers 1/2 Plats

1/2 Size Flat Containers

| Cuve Non Perforée Non-perforated Bottom | Couleur Color | Dim. ext. / Outside dim. Dim. int. / Inside dim. |
|---|---|---|
|  | | |
| SY310.05A |  | 300 x 280 x 55 mm 270 x 270 x 45 mm |
| SY320.05A |  | " |
| SY330.05A |  | " |
| SY340.05A |  | " |
| SY350.05A |  | " |
| SY360.05A |  | " |
| | | |
| SY310.08A |  | 300 x 280 x 85 mm 270 x 270 x 75 mm |
| SY320.08A |  | " |
| SY330.08A |  | " |
| SY340.08A |  | " |
| SY350.08A |  | " |
| SY360.08A |  | " |

Accessoires 1/2 Plats

1/2 Size Flat Accessories

| Référence Reference | Description Description | Dimensions Dimensions |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SY392.03 | Panier grillagé Mesh Basket | 255 x 245 x 30 mm |
| SY393.00 | Fond grillagé Mesh Bottom | 258 x 258 x 30 mm |
| SY852.00 | Tapis Silicone Silicone Mat | 245 x 245 mm |



Containers Mini DIN 1/4

1/4 Mini Containers



| Cuve Non Perforée Non-perforated Bottom | Couleur Color | Dim. ext. / Outside dim. Dim. int. / Inside dim. |
|--|------------------|---|
| | | |
| SY410.04A | | 310 x 140 x 45 mm 280 x 130 x 40 mm |
| SY420.04A | | " |
| SY430.04A | | " |
| SY440.04A | | " |
| SY450.04A | | " |
| SY460.04A | | " |
| SY410.07A | | 310 x 140 x 75 mm 280 x 130 x 70 mm |
| SY420.07A | | " |
| SY430.07A | | " |
| SY440.07A | | " |
| SY450.07A | | " |
| SY460.07A | | " |
| SY410.10A | | 310 x 140 x 105 mm 280 x 130 x 100 mm |
| SY420.10A | | " |
| SY430.10A | | " |
| SY440.10A | | " |
| SY450.10A | | " |
| SY460.10A | | " |

Accessoires 1/4

1/4 Accessories

| Référence Reference | Description Description | Dimensions Dimensions |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SY492.05 | Panier grillagé Mesh Basket | 265 x 120 x 45 mm |
| SY850.10 | Tapis Silicone Silicone Mat | 270 x 125 mm |





Containers Dentaires Dental Containers

Non perforée
Non-perforated

Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.



| | |
|-----------|---|
| SY510.04A | 310 x 190 x 45 mm 280 x 180 x 40 mm |
| SY510.06A | 310 x 190 x 65 mm 280 x 180 x 60 mm |
| SY510.08A | 310 x 190 x 85 mm 280 x 180 x 80 mm |
| SY510.10A | 310 x 190 x 105 mm 280 x 180 x 100 mm |
| SY510.13A | 310 x 190 x 135 mm 280 x 180 x 130 mm |

Perforée
Perforated

Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.



| | |
|-----------|---|
| SY511.04A | 310 x 190 x 45 mm 280 x 180 x 35 mm |
| SY511.06A | 310 x 190 x 65 mm 280 x 180 x 55 mm |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

Paniers Grillagés Dentaires Dental Wire Baskets

Référence
Reference

Dimensions
Dimensions

SY590.13

270 x 170 x 45 mm





Containers 1/2 Dentaires

1/2 Dental Size Containers

Cuve Non Perforée
Bottom non-perforated



SY515.05

Couleur
Color



Dim. ext. / Outside dim.
Dim. int. / Inside dim.

210 x 155 x 55 mm
180 x 145 x 50 mm

CONSOMMABLES / ACCESSOIRES DE CONTAINERS

DISPOSABLE AND ACCESSORIES





Porte-filtres

Filters Holder

| Référence Reference | Description Description | Unité Vente Sales Unit |
|------------------------|---|---------------------------|
| SY809.00 | Porte-filtre 1/1, 1/2, 3/4 Filter holder 1/1, 1/2, 3/4 | 1 |
| SY807.00 | Porte-filtre Mini, dental Filter holder Mini, Dental | 1 |



Filtres Papier Usage Unique

Disposable Paper Filters

| Référence Reference | Type Container Container Type | Indicateur Vapeur Steam indicator | Dimensions Dimensions | Unité Vente Sales Unit |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ST30.001 | 1/1, 1/2, 3/4 | Avec With | Ø 190 mm | 1000 |
| ST30.002 | Mini, Dentaires Mini, Dental | Avec With | 235 x 118 mm | 1000 |

Filtres PTFE Teflon Permanents

Permanent PTFE Filters

| Référence Reference | Type Container Container Type | Description Description | Dimensions Dimensions | Unité Vente Sales Unit |
|------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| ST30.051 | 1/1, 1/2, 3/4 | 1200 cycles d'utilisation 1200 cycles of use | Ø 190 mm | 10 |
| ST30.052 | Mini, Dentaires Mini, Dental | 1200 cycles d'utilisation 1200 cycles of use | 215 x 95 mm | 10 |






Plombs de verrouillage *Security Seals*



| Référence <i>Reference</i> | Description <i>Description</i> | Couleur <i>Color</i> | Unité Vente <i>Sales Unit</i> |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| ST29.010 | Standards - Sans indicateur vapeur <i>Standard - Without steam indicator</i> | ● | 1000 |
| ST29.020 | Standards - Avec indicateur vapeur <i>Standard - With steam indicator</i> | ● | 1000 |
| ST29.030 | Universels - Sans indicateur vapeur <i>Universal - Without steam indicator</i> | ● | 1000 |
| ST29.040 | Universels - Avec indicateur vapeur <i>Universal - With steam indicator</i> | ● | 1000 |

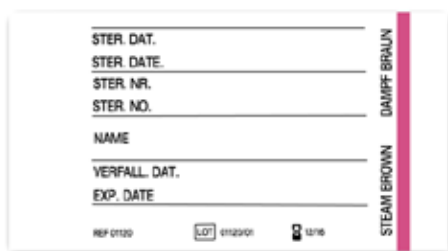

Étiquettes Usage Unique

Disposable Labels

| Référence Reference | Autocollant Self-sealing | Indicateur vapeur Steam Indicator | Dimensions Dimensions | Unité Vente Sales Unit |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ST32.B001 | Non No | Avec With | 64 x 36 mm | 1000 |
| ST32.B002 | Oui Yes | Avec With | 60 x 18 mm | 1000 |

Étiquettes Aluminium Métal Photo

Metal Photo Aluminium Labels

| Référence Reference | Description Description | Dimensions Dimensions | Unité Vente Sales Unit |
|------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| ST24.001 | Adhésives avec code barre et texte Adhesive with barcode and text | 40 x 20 mm | 175 |
| ST24.002 | " | 50 x 20 mm | 150 |
| ST24.003 | " | 50 x 30 mm | 96 |

autres dimensions sur demande
other dimensions on request



Étiquettes Aluminium

Aluminium Labels

| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions | Unité Vente Sales Unit |
|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| SY820.01 | Grey | 50 x 18 x 1 mm | 1 |
| SY820.02 | Yellow | " | 1 |
| SY820.03 | Red | " | 1 |
| SY820.04 | Blue | " | 1 |
| SY820.05 | Green | " | 1 |
| SY820.06 | Black | " | 1 |

* Marquage laser en option
* Optional laser marking



ÉTIQUETTES BAGAGE

HANG LABELS




Étiquettes bagage

Hang Labels

| Référence Reference | Couleur Color | Dimensions Dimensions | Inscription Inscription | Unité Vente Sales Unit |
|------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ST35.301A | ○ | 236 x 50 mm | - | 250 |
| ST35.301C | ● | 236 x 50 mm | - | 250 |
| ST35.301E | ● | 236 x 50 mm | - | 250 |
| ST35.301F | ● | 236 x 50 mm | - | 250 |
| ST35.301H | ● | 236 x 50 mm | - | 250 |
| ST35.121 | ● | 240 x 50 mm | URGENT | 250 |
| ST35.124 | ● | 240 x 50 mm | URGENT | 250 |
| ST35.125 | ● | 240 x 50 mm | URGENT | 250 |
| ST35.127 | ● | 240 x 50 mm | URGENT | 250 |
| ST35.128 | ● | 240 x 50 mm | URGENT | 250 |
| ST35.101 | ● | 240 x 50 mm | En prêt | 250 |
| ST35.107 | ● | 240 x 50 mm | En prêt | 250 |
| ST35.139 | ● | 240 x 50 mm | Réservé | 250 |
| ST35.146 | ● | 240 x 50 mm | En dépôt | 250 |
| ST35.271 | ● | 240 x 50 mm | Ancillaire de prêt | 250 |
| ST35.348 | ● | 240 x 50 mm | RETOUR ANCILLAIRE | 250 |

ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

CUSTOM HANG LABELS

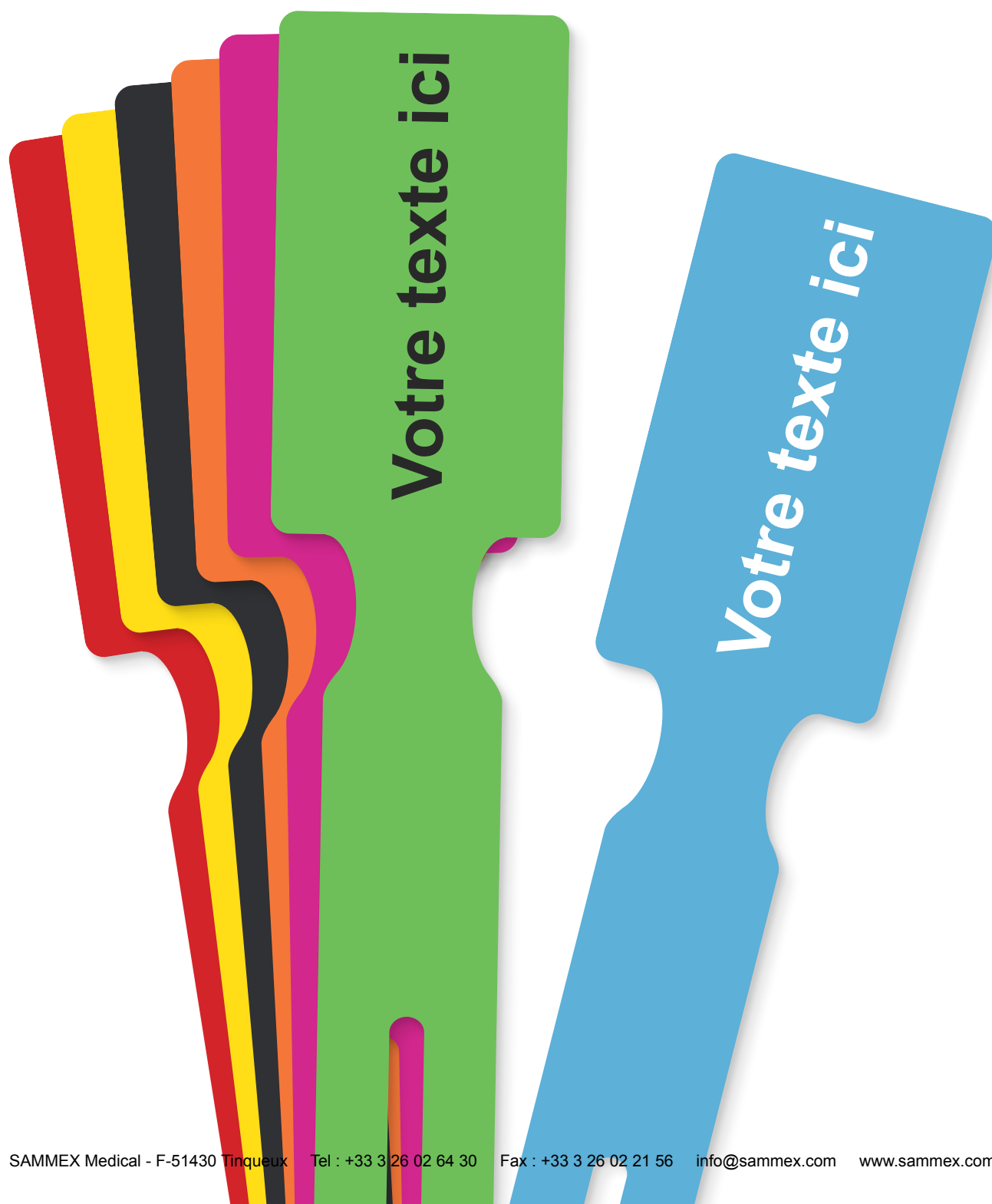

ÉTIQUETTES BAGAGE PERSONNALISABLES

☐ Commande ☐ Devis ☐ Échantillons

Taille choisie










- ☐ 236 x 50 mm (Grand modèle)
☐ 150 x 35 mm (Petit modèle)

Texte personnalisé

Couleur texte

- ☐ Blanc ☐ Noir

Couleur étiquette

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |
| <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |  |

Quantité (minimum 2500)

Commentaires :

Coordonnées / Cachet :

MARQUAGE LASER PERSONNALISÉ

CUSTOM LASER MARKING

MAINTENANCE CONTAINERS - REPAIR SERVICE



Le marquage laser permet d'identifier de façon permanente les dispositifs médicaux grâce à un code barre, code DataMatrix, texte, numérotation, date, logo...

EXEMPLES DE MARQUAGE LASER :



container de stérilisation



paniers de stérilisation



étiquettes polypropylène*



étiquettes inox



étiquettes aluminium

**Le gravage des matières plastiques nécessite au préalable un essai afin de valider la faisabilité.*

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

SAMMEX Medical

20, route de Champigny
F-51430 TINQUEUX



+33(0)3 26 02 64 30



+33(0)3 26 02 21 56



info@sammex.com



www.sammex.com

MAINTENANCE DES CONTAINERS

REPAIR SERVICE





CONTRÔLE ET RÉPARATION

- **Réalisation de maintenance préventive et curative (dans nos ateliers)**
- **Diagnostic complet à réception des containers**
- **Mise en conformité avec délivrance d'un certificat**
- **Test d'étanchéité selon le protocole de l'Afnor**
- **Traçabilité de la maintenance (éléments du containers gravés et datés)**
- **Forfait de maintenance selon la taille du container**
- **Possibilité de prêt de containers durant l'immobilisation des containers**

AVANTAGES CLIENT

- **Maintenance effectuée par rotations adaptées au rythme du client**
- **Immobilisation de courte durée**
- **Possibilité de prêt de containers durant la réparation**
- **Tarif préférentiel sur les pièces détachées**

NOTICE D'UTILISATION SYSTÈME DE CONTAINERS

STERILIZATION CONTAINER SYSTEM



- 01 - Sur-couvercle (en option)
- 02 - Couvercle en Aluminium
- 03 - Cuve en Aluminium
- 04 - Joint d'étanchéité en Silicone*
- 05 - Patte de fermeture
- 06 - Bouton de sécurité
- 07 - Filtre papier
- 08 - Porte-filtre
- 09 - Emplacements pour étiquettes
- 10 - Ressort de fermeture avec fente de verrouillage
- 11 - Poignée en Acier

**Le joint d'étanchéité est fixé au couvercle à l'aide d'une colle silicone stérilisable afin d'éviter tout décollement. Sa durée de vie varie selon la fréquence d'utilisation, mais nous garantissons un cycle de 1000 stérilisations (ou 4 ans)*



SAMMEX Medical
20 route de Champigny
51430 Tinquieux

Tel : +33(0)3 26 02 64 30
Fax : +33(0)3 26 02 51 56
info@sammex.com
www.sammex.com

1 • MISE EN GARDE



Ne pas utiliser les containers défectueux ou endommagés.

Un container de stérilisation non étanche augmente le risque de contaminations. En cas de combinaison du container avec des pièces provenant d'autres fabricants, l'étanchéité et la fonction de barrière microbienne ne sont plus garanties.

La notice d'utilisation donne les indications d'utilisation et d'entretien à suivre pour conserver les performances revendiquées par le container de stérilisation. Ne pas respecter ces indications est susceptible d'atteindre à l'intégrité du container et d'empêcher un fonctionnement sûr et en toute sécurité.

Conserver cette présente notice dans un endroit accessible par le personnel utilisateur

2 • DESCRIPTION

2-1 Champ d'application

Le système de containers SAMMEX est un système de barrière stérile réutilisable, qui permet de stériliser, de stocker et de transporter des dispositifs médicaux jusqu'à leur utilisation ou jusqu'à leur date de péremption. Il rend également possible leur réacheminement après utilisation.

Utilisés dans des conditions optimales (voir ci-après), le contenu peut être maintenu à l'état stérile pendant 6 mois. Au delà de 500 cycles de stérilisation, le container doit être soumis à maintenance.

2-2 Utilisateurs

Seules les personnes possédant la formation, et/ou la qualification nécessaires doivent manipuler les produits et leurs accessoires. Doivent donc être formés ou qualifiés par le ou les responsables des services de stérilisation les agents chargeant, manutentionnant transportant le container après et/ou avant la stérilisation, y compris les opérateurs de lavage.

2-3 Installation et équipement

Toutes les installations et tous les équipements de l'utilisateur, y compris les modes de stockage et de transport, doivent être validés par l'utilisateur conformément aux normes et bonnes pratiques en vigueur afin d'assurer l'efficacité de la stérilisation dans le cadre des performances revendiquées par le containers de stérilisation.

2-4 Mode de fonctionnement

Le système de containers SAMMEX est conforme aux exigences des normes DIN 58953-9 et EN ISO 11607.

Les containers de stérilisation avec couvercle et cuve non perforée / cuve perforée sont validés pour la stérilisation à la vapeur dans un stérilisateur conforme à la norme EN 285.

2-5 Garantie

Les containers de stérilisation SAMMEX sont soumis à un contrôle de qualité avant leur livraison. Une garantie d'un an est appliquée à tous les containers contre les éventuels défauts de fabrication (non causés par un mauvais usage du matériel).



La garantie ne couvre pas les parties exposées à une usure, ainsi que les réparations ou remplacements exécutés par un personnel non autorisé par SAMMEX.

Les données, les descriptions et les images sont purement indicatives, SAMMEX se réserve le droit de modifier ses produits.

2-6 Identification

Le gravage est le moyen de traçabilité le plus sûr. Chaque container SAMMEX comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro est le même sur chaque élément composant le container (cuve, porte-filtre, couvercle, sur-couvercle). Bien que chaque élément soit adaptable sur un autre container, il est fortement recommandé de ne pas les mélanger afin de garantir une meilleure traçabilité.

3 • PRÉPARATION / MISE EN SERVICE

3-1 Consignes préliminaires

Respecter les consignes suivantes avant toute utilisation et afin d'éviter d'éventuels dommages provoqués par un montage ou une utilisation incorrecte :

- Vérifier le fonctionnement et l'état du produit avant de l'utiliser
- N'utiliser ce produit que conformément à la présente notice
- Respecter les consignes de maintenance et de sécurité
- Ne pas utiliser de containers endommagés, ni défectueux
- Remplacer immédiatement les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine
- S'assurer que seules des personnes possédant la formation, les connaissances ou l'expérience requises manipulent le produit
- Conserver la notice dans un endroit accessible à tout le personnel

3-2 Première mise en service

Effectuer un contrôle de tous les éléments du container :

- Détériorations, déformations...
- Joint d'étanchéité en parfait état (coupures, absence de couleur brunâtre).
- Encliquetage du porte-filtre en parfait état
- Couvercle sur la cuve hermétique



À réception des containers neufs, il est recommandé de procéder à un nettoyage avant la première utilisation (se référer au paragraphe nettoyage). Une application d'alcool éthylique permettra d'éliminer la présence de résidu éventuel.

4 • UTILISATION

4.1 Charge du container

Les containers utilisés en prévision d'un chargement doivent être préalablement nettoyés selon le protocole de l'établissement afin de ne pas remettre en cause l'efficacité de la stérilisation.

Il est recommandé de ne pas dépasser les charges maximales suivantes :

| | Charge métal maximale | Charge textile maximale |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Container 1/1 | 10 kg | 7 kg |
| Container 3/4 | 5 kg | 3 kg |
| Container 1/2 | 5 kg | 3kg |

4.2 Changement du filtre

Remplacer le filtre à usage unique avant chaque stérilisation :

- Retirer le porte-filtre en appuyant sur le bouton poussoir
- Insérer le nouveau filtre à l'endroit prévu
- Remettre en place le porte-filtre
- Appuyer sur le bouton poussoir jusqu'à son encliquetage



Il est formellement interdit de substituer des filtres ronds à des filtres rectangulaires ou des filtres rectangulaires à des filtres ronds.

Qu'ils soient ronds ou rectangulaires les filtres doivent couvrir entièrement les perforations du couvercle. Le filtre doit être propre, non déchiré, non coupé, non troué.

4.3 Chargement du container

Instruments

- Ranger les instruments dans un panier de stérilisation avec des systèmes de rangement appropriés
- Pour une stérilisation optimale, envelopper séparément les paniers de stérilisation

Textiles

- Plier les textiles afin de les placer verticalement dans le container
- Envelopper séparément chaque textile
- Ne pas tasser les textiles dans le container, vérifier qu'il est encore possible de passer la main entre chacun d'entre eux

4.4 Verrouillage du container de stérilisation

- Charger le container de stérilisation de telle sorte que le porte-filtre reste dégagé : la charge doit être placée de façon à être au moins distante de quelques centimètre du porte filtre
- Placer le couvercle sur la cuve et verrouiller le container en pressant les pattes de fermeture
- Assurez vous du bon encliquetage lors du verrouillage des fermetures (témoin sonore)

4.5 Mise en place du clip ou du plomb de verrouillage

À chaque extrémité du container, placer un clip ou un plomb de verrouillage dans la fente du ressort de fermeture prévu à cet effet afin de le sceller. Afin de prévenir toute ouverture accidentelle dissimulée, il est conseillé d'utiliser des plombs avec indicateur de passage.

4.6 Mise en place de l'étiquette de documentation

Afin de garantir une meilleure traçabilité, il est recommandé d'utiliser une étiquette

- Indiquer sur l'étiquette les informations importantes : la date de stérilisation, le contenu, la date de péremption, le nom...
- Placer l'étiquette à l'extrémité du container dans l'emplacement prévu à cet effet.

4.7 Chargement de l'autoclave

- Ne pas utiliser d'emballage extérieur pour les containers
- Toujours placer les containers de stérilisation les plus lourds dans le bas de l'autoclave
- Respecter la hauteur maximale d'empilage de 60 cm
- Ne pas obturer le passage de l'air sur tout type de container (cuve, couvercle perforé). Ne pas mettre de sachet dessus ou dessous, ne pas envelopper par un film d'emballage...
- Toujours transporter les containers de stérilisation par les poignées

4.8 Déchargement de l'autoclave

- Toujours utiliser des gants de protection
- Laisser refroidir les containers de stérilisation à température ambiante, en laissant l'autoclave légèrement ouvert
- Stocker les containers de stérilisation dans une pièce climatisée

4.9 Contrôle de stérilisation

Le contenu d'un container de stérilisation n'est considéré comme stérile que lorsque le container a été stérilisé dans les règles. C'est pourquoi il convient de contrôler que la stérilisation ait été effectuée avec succès.

- Vérifier que les plombs de verrouillage ne soient pas endommagés
- Vérifier que la couleur du témoin de passage (indicateur placé sur le filtre, ou sur le plomb, ou dans le container) a changé de couleur

4.10 Stockage

- Il est déconseillé d'empiler les containers de stérilisation les uns sur les autres
- En cas d'empilement ne dépassez pas la hauteur maximale d'empilage de 60 cm
- Conserver les containers de stérilisation dans un lieu sec, propre et protégé
- Respecter la durée de stockage et les conditions de stockage recommandés par les normes en vigueur (DIN58953 , EN11607-1, EN11607-2)

Pour information, la durée de stockage dépend des conditions de



stockage (de quelques semaines à plusieurs mois). Cette durée doit être déterminée par le responsable de la stérilisation de l'établissement.

Toutefois, dans des conditions optimales, le contenu d'un container peut être stérile durant 6 mois.

IMPORTANT

En cas d'ouverture involontaire d'un container stérile, celui-ci doit être stérilisé de nouveau.

5 • NETTOYAGE

À chaque retour du bloc opératoire, il faut procéder à un cycle de lavage manuel ou machine. Le personnel doit être protégé contre les effets de la manipulation ou de l'aspersion des produits de nettoyage utilisés.



Respecter impérativement les recommandations des fournisseurs de produits lessiviels ainsi que celles des installateurs des laveurs désinfecteurs.

5.1 Le nettoyage manuel

- Nettoyer les surfaces à l'aide d'un chiffon propre et d'une solution détergente au pH neutre.
- Éliminer les salissures avec une brosse souple non métallique
- Effectuer le rinçage final avec de l'eau déminéralisée
- Utiliser des détergents compatibles avec l'aluminium anodisé
- Se conformer à la notice d'utilisation du détergent

5.2 Le nettoyage en machine

- Utiliser exclusivement des nettoyants au pH neutres validés par le fabricant pour le nettoyage de l'aluminium anodisé
- Éviter les zones d'ombres
- Afin d'éviter toute détérioration de l'aluminium, ne pas employer de produits de neutralisation acides
- Utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final
- Respecter les indications du fabricant de la machine de nettoyage automatique ainsi que celles du fabricant des produits d'entretien

Le programme de lavage et les produits lessiviels associés doivent être compatibles avec l'aluminium anodisé et l'acier inox (pattes de fermeture, poignées..)

Les brosses métalliques, les produits abrasifs et autres soudes caustiques ou carbonate de sodium sont formellement interdits. Une solution alcaline peut endommager l'aluminium anodisé. Conformément à la norme EN 285 (annexe B) il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée.

Nous vous rappelons que le nettoyage est exclusivement à la charge de l'utilisateur.

Avant le 1er lavage, à la mise en service, appliquer de l'alcool éthylique sur toute la surface en aluminium du container afin d'éliminer tout résidu éventuel.

Séparer l'ensemble des pièces du container



IMPORTANT

5.3 Le séchage

Le séchage est une phase importante pour la bonne tenue du container, pour cette raison il est recommandé de requérir le plus grand soin. Nous vous conseillons d'utiliser un linge sec afin de bien assécher toutes les parties du container.



Il est formellement déconseillé d'utiliser l'air comprimé pour sécher les parties en silicone des containers, les couvercles et portes-filtres, une telle pratique aurait pour conséquence de décoller les joints.

6 • MAINTENANCE

6-1 Entretien

L'entretien quotidien et la maintenance des containers de stérilisation SAMMEX relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Un contrôle visuel et fonctionnel de routine des containers de stérilisation est impératif. Il doit être effectué par un personnel formé.

Joint en silicone du couvercle

- Vérifier que le joint de silicone expansé reste souple
- Vérifier l'absence d'écrasement du bord de la cuve (une empreinte doit être visible)
- Vérifier qu'il n'y ait aucune zone décollée
- Vérifier que le joint n'ait pas une couleur brunâtre

Le porte filtre

- Vérifier que le joint du porte-filtre soit occlusif et qu'il n'y ait pas de rotation possible sans le filtre (rotation possible mais difficile avec le filtre)
- Vérifier que le porte-filtre claqué bien lors de sa mise en place sur le couvercle
- Vérifier que le rivet central du porte-filtre ne présente aucune laxité

Le couvercle et la cuve

- Vérifier que la cuve et le couvercle n'aient subi aucun choc visible
- Vérifier que le couvercle s'ajuste sur la cuve sans forcer et sans gauchissement
- Déceler les éventuelles déformations dues à l'effet d'implosion du container de stérilisation.
- Vérifier que les pattes de fermetures claquent lors de la fermeture.

Tableau des défauts/décisions (non exhaustif) :

| Constat | Action à entreprendre |
|---|------------------------------|
| Cuve et/ou couvercle cabossé | Envoyer au service technique |
| Joint du couvercle décollé | Envoyer au service technique |
| Joint du couvercle non élastique | Envoyer au service technique |
| Joint du couvercle coupé | Envoyer au service technique |
| Joint du couvercle brunâtre | Envoyer au service technique |
| Présence de tâches blanchâtres sur les parois (cuve et couvercle) | Mettre en quarantaine |
| Présence de résidus de colle et/ou de ruban adhésif | Nettoyage |
| Poignée cassée | Mettre en quarantaine |
| Cuve et couvercle ne s'emboîtent pas | Envoyer au service technique |
| Porte-filtre branlant | Remplacer la pièce |
| Plot de porte-filtre cassé | Envoyer au service technique |

6-2 Service Technique

Si vous rencontrez l'un des problèmes ci-dessus contactez :

SAMMEX Medical
Service Technique
20 Route de champigny
51 430 TINQUEUX
tel : 03.26.02.64.30
fax : 03.26.02.21.56
e-mail : info@sammex.com

6-3 Accessoires / Pièces de rechange

Les accessoires (paniers, sur-couvercle...), pièces de rechange (cuve, couvercle, porte-filtre...) et consommables (filtres, étiquettes, plombs...) sont disponibles sur les catalogues «Containers de stérilisation et consommables» et «Paniers et accessoires».

6-4 Fin de vie / Recyclage

1. Le container doit être décontaminé et lavé par l'établissement après la dernière utilisation.
2. Si l'établissement dispose pas d'un réseau de recyclage/élimination alors toutes les parties métalliques du container (aluminium, acier inox) sont recyclables. Les parties silicone ne sont pas recyclables donc sont classés en DIB (déchets industriels banals). Les opérations de recyclage/élimination doivent être faites en équipant le personnel des EPI adaptés (EPI : équipements de protection individuels).
3. Si l'établissement ne dispose d'un réseau d'élimination/recyclage alors le container peut être envoyé à Sammex pour gestion de son recyclage et de son élimination.

7 • NORMES

- EN 11607-1
- EN 11607-2
- EN 285
- EN 868-8
- DIN 58953-9

Date de création : 2 octobre 2019 - indice 001
Date de révision : 05 mars 2019



Nous Contacter :

www.ibmhconseils.com

contact@ibmhconseils.com